

Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze

Benutzerhandbuch und Montageanleitung

Verbleibt beim Produkt

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	2
BENUTZERHANDBUCH	3
MONTAGEANLEITUNG	8
SERVICEINFORMATION.....	122
ERSATZTEILEN.....	133
REKLAMATION	144



Immer dieses Handbuch vor Montage und
Ingebrauchnahme durchlesen

Allgemeine Produktinformation

Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze ermöglicht einfache Höhenverstellung der Ropox Toilettenstützen und bietet somit optimalen Komfort für den Benutzer.

Technische Daten

Produktname:	Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze	
Warennummer:	40-40907	
		
Höhenverstellbereich:	120 mm	
Materialien:	Wandbeschlag Abdeckung Leisten Knopf	Oberflächenbehandelter Stahl ABS PVC Aluminium
Oberflächenbehandlung:	Knopf Stahl	Pulverlackierung Blauchromat
Max. Belastbarkeit:	Belastungsgeprüft und sicher bis zu 400 kg Max. Benutzergewicht gemäß DS/EN 12182: siehe Seite 6	
Eigengewicht:	4 kg (ausschl. Toilettenstütze)	
Anwendungstemperatur:	10-40° C	
Luftfeuchtigkeit:	5-85 % (nicht kondensierend)	
Hersteller:	Ropox A/S DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk	




Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung und ist gemäß den europäischen Normen für Hilfsmittel für Behinderte DS/EN ISO 12182 geprüft worden. Es ist gemäß den relevanten Anforderungen der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG hergestellt worden und gehört zur niedrigsten Risikoklasse 1.

Anwendung

Die Einheit kommt zur Höhenverstellung der Toilettenstützen zum Einsatz. Sie bietet einfache Verstellung ohne die Verwendung von Werkzeugen. Die Höhe lässt sich durch Ziehen des Handgriffes und Anbringung der Toilettenstütze in der gewünschten Höhe verstellen. Die Toilettenstütze wird durch Loslassen des Handgriffes automatisch verriegelt.

Höhenverstellung mit Handgriff

Durch Ziehen des Handgriffes kann die Toilettenstütze in Abständen von 15 mm um 120 mm verstellt werden.

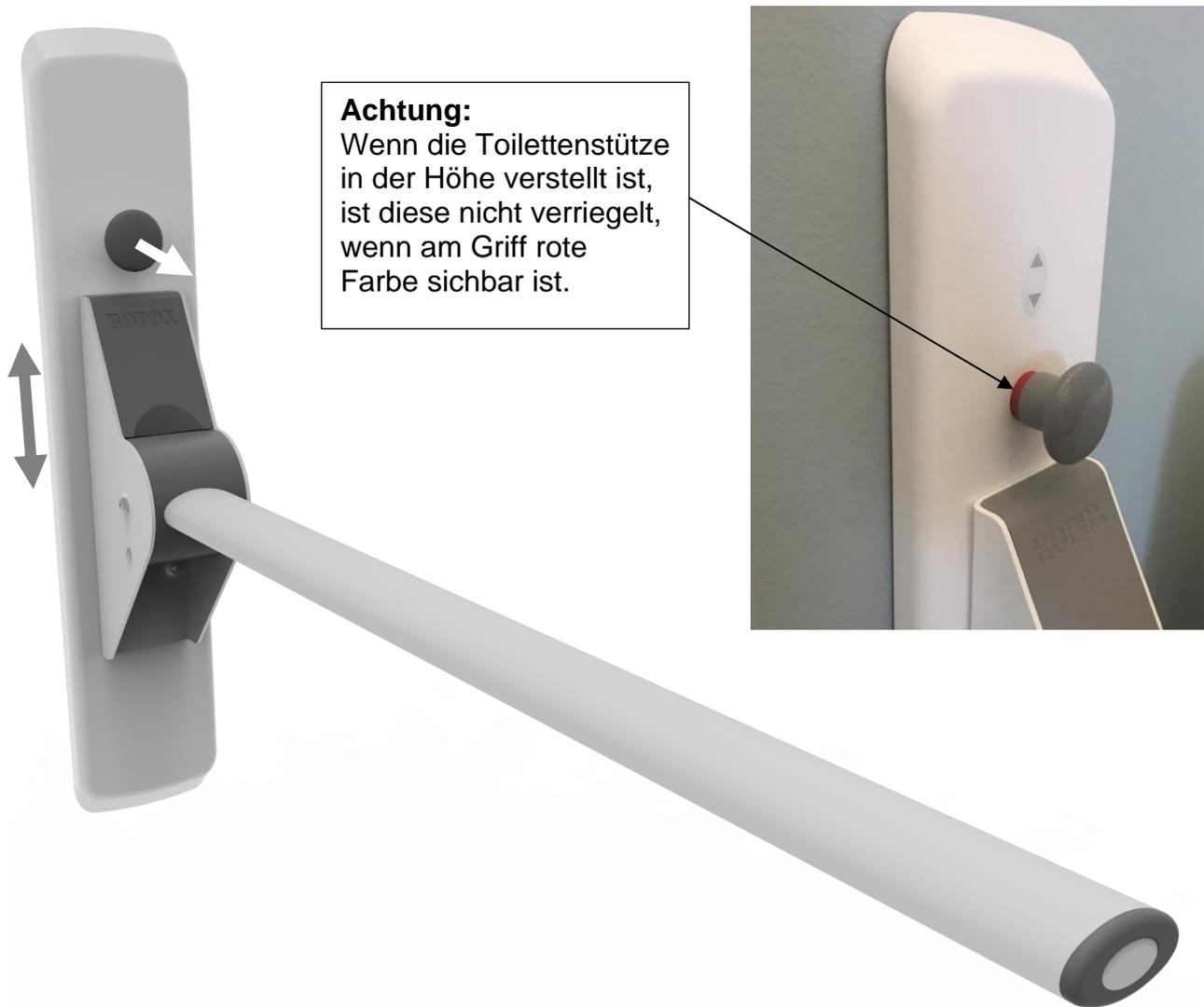

Benutzerhandbuch

Reinigung

Bei Benutzung kann Verschmutzung vorkommen. Immer die Einheit gemäß dieser Anleitung reinigen.

Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze mit einem gewrungenen Lappen mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen. Keine ätzende/schleifende Flüssigkeiten oder schleifende Lappen, Bürsten oder Schwämme verwenden.

Desinfektion kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

Label

Jede Einheit hat ein eigenes Label wie abgebildet. Dieses Label enthält wichtige Informationen, die bei Anfragen beim Lieferanten anzugeben sind.



Symbolübersicht:



Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.



Abfälle sortieren – wenn möglich für Recycling.



Ropox ist der Hersteller dieses Produktes.



CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an *General Safety and Functionality* der relevanten EU-Richtlinien und Normen.

Sicherheitshinweise


- Die Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze darf nur von Personen bedient werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Die Höhenverstelleinheit immer so verwenden, dass Schäden an Personen oder Gegenständen vermieden werden. Die Person, die die Höhenverstelleinheit bedient, ist für die Vermeidung von Schäden oder Verletzung verantwortlich.
- Änderungen, die auf die Funktion oder den Aufbau der Einheit einwirken können, sind nicht gestattet.
- Montage, Wartung und Reparaturen dürfen nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.
- Bei Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen darf die Einheit nicht belastet sein.

Montageanleitung

Einbaugrenzflächen

Anbringung der oberen Löcher

Die Anbringung hängt vom Typ der benutzten Toilettenstützen ab. Alle Abmessungen sind in mm angegeben und basieren auf einer festen Höhe bis zur Oberkante der Toilettenstütze von 800 mm +/- 60mm über dem Fußboden. Bei einer Änderung dieser Abmessung müssen die empfohlenen Abmessungen dementsprechend geändert werden.

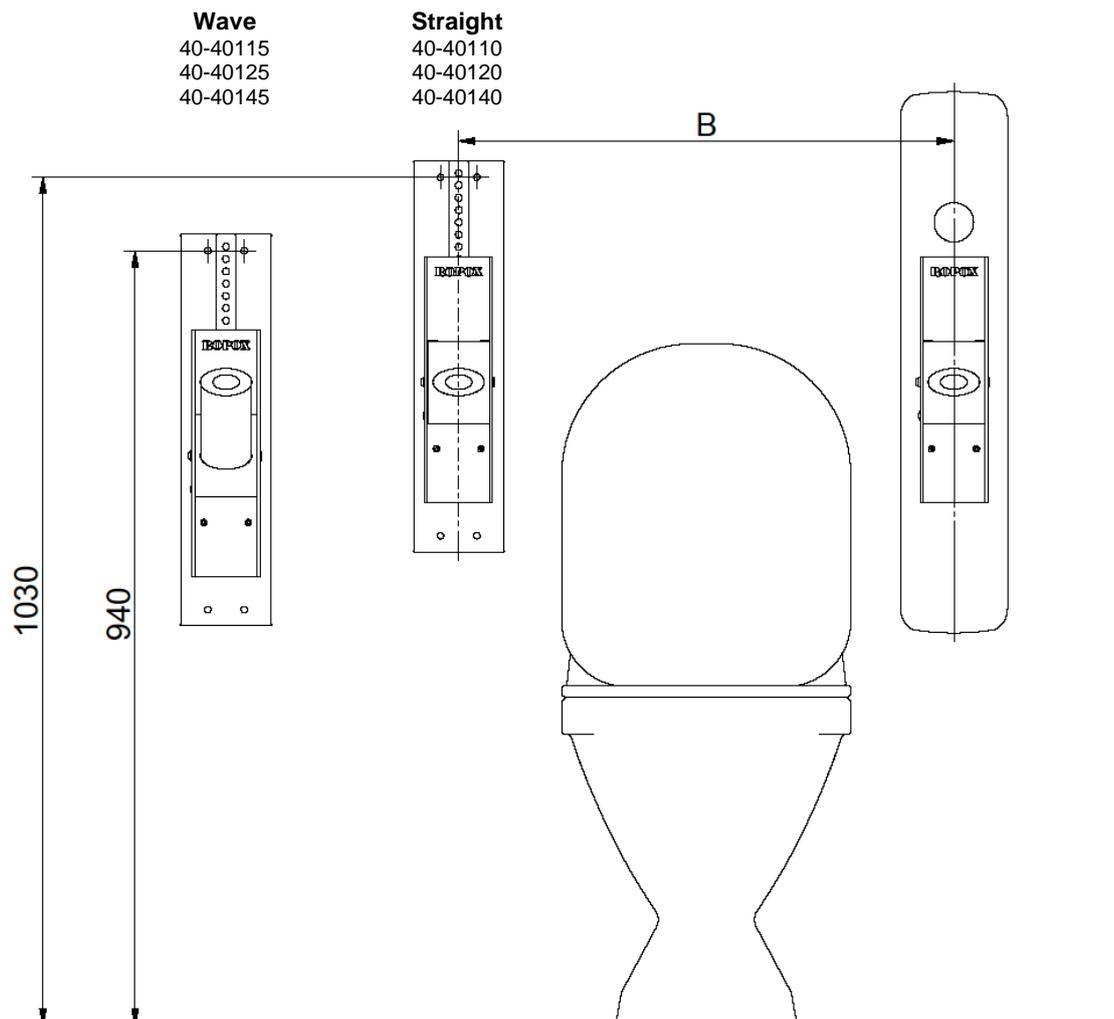


Der Abstand B

Der Abstand zwischen den Toilettenstützen hängt von der jeweiligen Norm ab.

Gemäß Norm	B
DS 3028	660 mm (600 mm zwischen den Toilettenstützen)
DIN 18040-1	712-762 mm

Montageanleitung

Einbaugrenzflächen

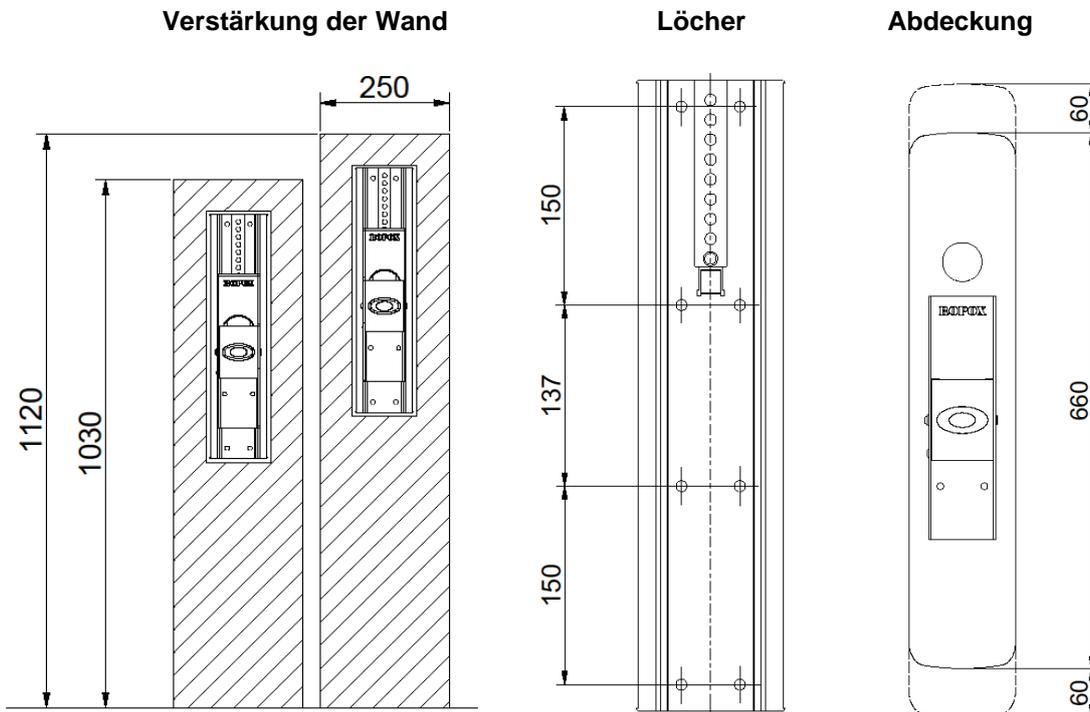

Der schraffierte Bereich ist der Mindestbereich für Verstärkung der Wand. Verstärkung vom Fußboden bis zur Decke ist empfehlenswert. Die Löcher werden aufgrund der oberen Löcher des Wandbeschlages gemessen und die Anbringung hängt vom Typ der Toilettenstütze ab. Es muss sichergestellt werden, dass sich die Abdeckung 60 mm auf- bzw. abwärts bewegen kann.

Das Wandmaterial muss schraubenfest und für Nassräume zugelassen sein. Die Einheit wird mit einem Satz (8 Stück) Schrauben und Dübel für Montage an einer Betonwand geliefert. Der Monteur sollte immer das Material, die Beschaffenheit und die Stärke der Wand berücksichtigen und geeignete Schrauben und Dübel für den jeweiligen Wandtyp verwenden.

Toilettenstütze	Max. Benutzergewicht gemäß DS/EN 12182	Max. Belastung der oberen Schrauben
40-40110	80 kg	72 kg
40-40115	80 kg	72 kg
40-40120	135 kg	72 kg
40-40125	135 kg	72 kg
40-40140	190 kg	171 kg
40-40145	190 kg	171 kg

Montageanleitung


40-40907

Achtung:

Schraubenmontage an der Wand muss immer unter Berücksichtigung der Stärke und Beschaffenheit der jeweiligen Wand erfolgen. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur richtunggebend für Montage an einer verstärkten Wand unter Berücksichtigung der angegebenen max. Schraubenbelastungen der Montageanleitung.




Achtung:

Für Anbringung der oberen Löcher siehe Einbaugrenzflächen.

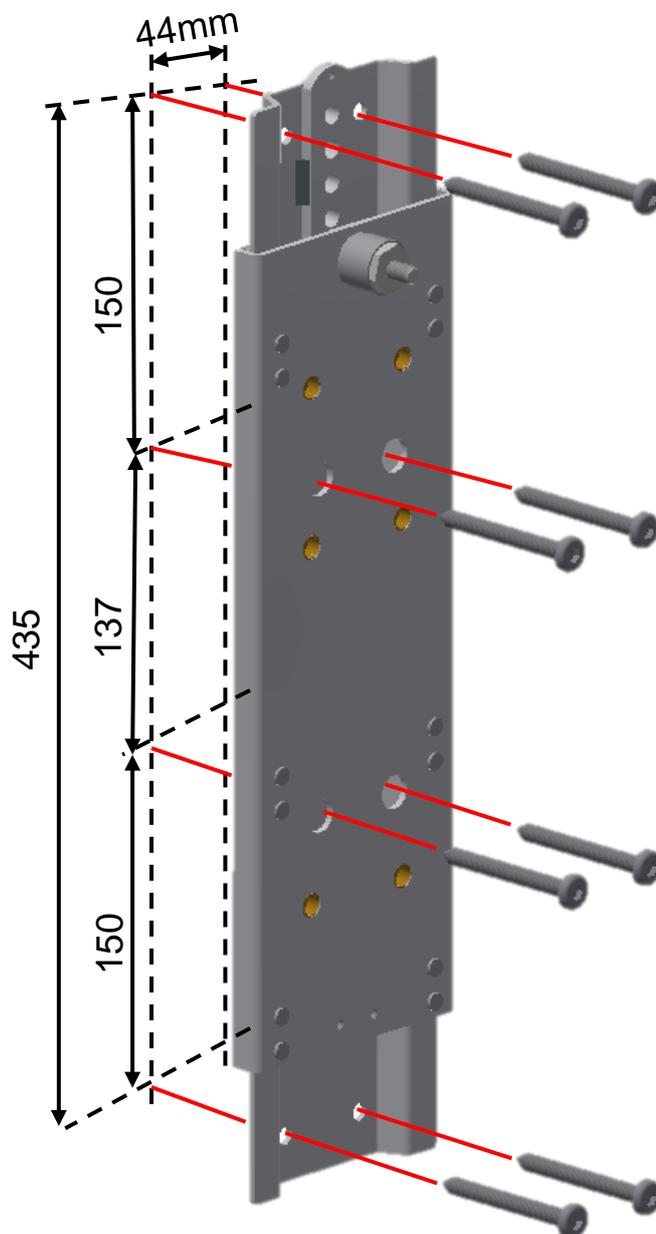

Empfohlen:
8 x 7,5x72
8 x Dübel

Montageanleitung

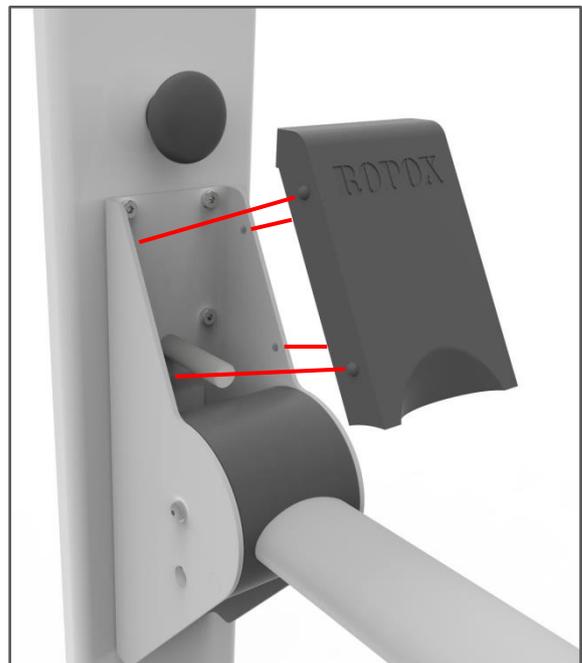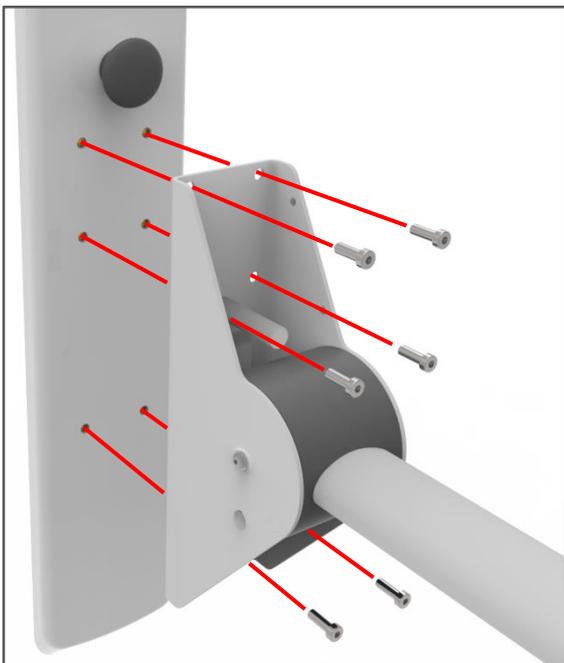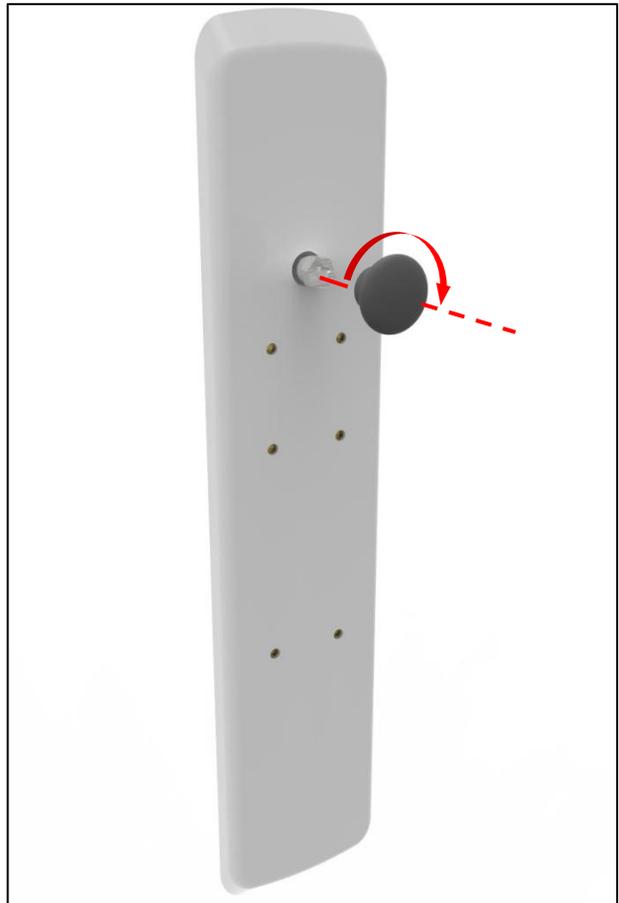

Wartung



Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen müssen von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Höhenverstellbare Einheit für Ropox Toilettenstütze ist wartungsfrei. Bewegliche Teile sind dauergeschmiert. Aus Sicherheits- und Betriebssicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Funktionsprüfung.


Überprüfung

Nach einem Monat

Überprüfen, ob Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, dass sich die Einheit 120mm auf- und abwärts bewegen kann.

Ersatzteilen

40-40907

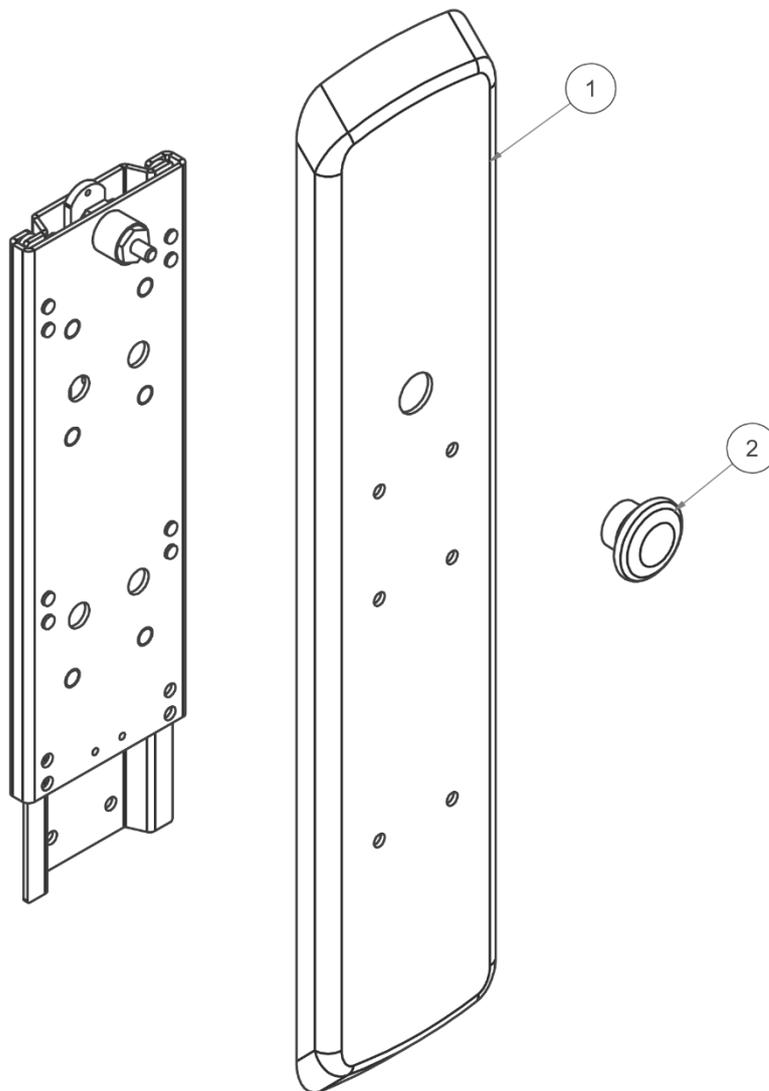

	Beschreibung	Warennummer
1	Abdeckung	40*40907-066
2	Knopf	40*43043-027

Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk